

## AVANT



Mouchez-vous et lavez-vous les mains avec du savon

## Comment utiliser Les tests BD Veritor™

# 1

## PRÉLÈVEMENT



**A**

Décolliez l'emballage et retirez la tige nasale

**B**



Insérer la tige dans la partie supérieure de la gorge et des amygdales

Frotter la tige nasale contre la partie supérieure du fond de la gorge. **Éviter la langue, les dents et les gencives.**

**C**




Insérer la même tige nasale jusqu'à **0,5 po** à l'intérieur de la narine. Tournez **5 fois dans chaque narine** et laissez la tige en place pendant **10 secondes**; gauche et droite.

# 2


## PRÉPARATION



Retirez le capuchon du tube et insérez l'écouvillon nasal

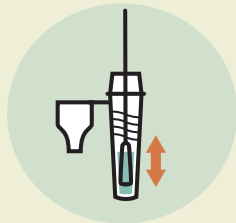

Remuez l'écouvillon **de haut en bas pendant 15 secondes**

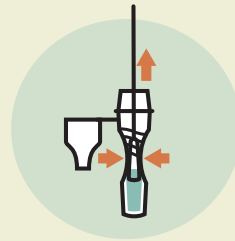


Pincez légèrement le tube pour extraire le liquide en retirant l'écouvillon



Remplacez le capuchon fermement sur le tube



# 3

## DÉPISTAGE

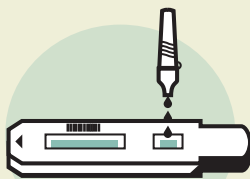


Ajoutez **3 gouttes** dans la cupule sur la bande d'échantillon du test

Attendez **15 min.** Voici l'exemple d'un test positif et d'un test négatif.

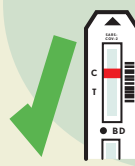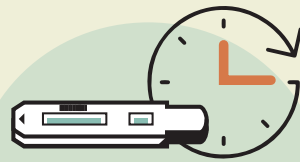

**NÉGATIF**

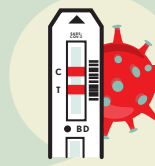

**POSITIF**

\* Si votre test rapide est **NÉGATIF**, vous devez effectuer un **2e test** **48 h plus tard**

☛ Si vous êtes **POSITIF**, référez-vous aux **consignes du MSSS**. Pour toute question, contactez la ligne **811**.

